
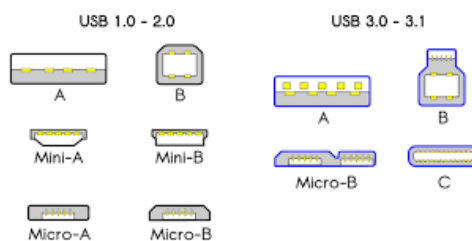


Approved by:	Version: 20211021	
Date:	Author: FW	Page 1 by 2

FujiFilm DriChem nx550 Instrument-tag

Dokumentet beskriver vilken instrument-tag mätaren ska märkas med för att fungera med Zafena POC-Workstation.

Fysisk anslutning sker med Seriell kabel från "COM" RS232 i instrumentet, till Seriell-USB konverterare, till USB type A i POC-Workstation.

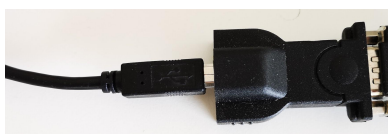

Intrument-tag: LMC-FDC3

Skriv ut och fäst instrument-taggen på eller intill instrumentet.
Följ sedan dokumentationen "Snabbguide - Arbetsflöde" för att utföra analys och skicka in resultat till journalsystemet.



Inställningar på instrument

1. Välj "Mode function"



Approved by:	Version: 20211021
Date:	Author: FW Page 2 by 2

- Välj menyval "Host I/F settings" och välj alternativ:
"Serial connection"
Communication method: **"Type 1"**
Print output: **"ON"**

Tryck på "Register" för att spara de nya inställningarna.

