

HemCheck Helge 1 Plus

Beskrivning

Tillvägagångssätt för anslutning av HemCheck Helge 1 till Zafena Plus-Skärm [ZAF-552].

Instrument-tag

Streckkoden som följer med kabelpaketet skall fästas synligt på mätaren för att enkelt kunna skannas av operatören. Instrument-tagen har den information som identifierar den unika mätaren, information som sedan följer provresultatet till LIS vid godkänd analys. Instrument-tagen berättar också för Plus-Skärmen vad för typ av instrument som är anslutet och som Plus-skärmen ska förvänta sig resultat från.

Instrument-tagen innehåller två, alternativt tre delar:



LMC-HCH1



LMC-HCH1-0001



LMC- indikerar för Plus-skärmen att streckkoden kommer med "instrument"-information

HCH1 indikerar för Plus-skärmen att det gäller "HemCheck Helge 1". Detta berättar även för Plus-skärmen vilket protokoll som ska användas vid kommunikation till mätaren, i vilken hastighet samtalet ska föras och vilken mjukvara / vy som ska startas på Plus-skärmen.

-0001 Alternativt fält som är reserverat för lokal identifiering av mätaren hos vårdgivaren. Detta fält är en option och behöver inte användas. Fältet kan innehålla ett löpnummer som följer mätarens liv hos vårdgivaren för att skapa spårbarhet vid felsökning. Vårdgivarens valbara identifikationsfält kan innehålla både siffror och bokstäver för att passa vårdgivarens interna arbetsflöden.

Ansluta kabeln

Anslut Usb-kabeln i någon av Plus-skärmens USB portar.

HemCheck Helge 1 använder sig av standard USB, vilket betyder att HemCheck Helge strömkabel (USB) kan anslutas till Plus-Skärmen direkt.

I den andra änden av kabeln finns den anslutningskontakt som krävs för att ansluta mätaren / instrumentet.



Utför analys

1. Starta Plus-skärmen och vänta till dess att den visar Välkomst vyn.
2. Använd Plus-skärmens streckodsläsare och skanna mätarens / instrumentets instrument-tag.
3. Följ instruktionerna i Plus-Skärmens informationslist.
4. Utför mätning enligt mätaren / instrumentets manual.
5. Addera patient-ID med streckodsläsaren.
6. Mätresultatet presenteras i Plus-skärmens vy.
7. Operatören godkänner analysen, som skickas in till LIS.

