

Hemocue 201+ Plus

Beskrivning

Tillvägagångsätt för anslutning av Hemocue 201+ Hb och Glucose till Zafena Plus skärm (ZAF-552).

Instrument-tag

Streckkoden som följer med kabelpaketet skall fästas på mätarens ovansida för att enkelt kunna skannas av operatören. Instrument-taggen berättar för Plus-skärmen vad för typ av instrument som är anslutet och som Plus-skärmen ska förvänta sig resultat från. Instrument-taggen kan även innehålla den information som identifierar den unika mätaren i organisationen, information som sedan följer provresultatet till LIS vid godkänd analys.

Instrument-tag för Hemocue 201+ RT



LMC-HHB2

Presenterar resultat i g/dL



LMC-HHB3

Presenterar resultat i g/L



LMC-HGL2

Presenterar plasma-ekvivalent resultat i mg/dL



LMC-HGL3

Presenterar plasma-ekvivalent resultat i mmol/L



LMC-HGL4

Presenterar resultat i mg/dL



LMC-HGL5

Presenterar resultat i mmol/L



Exempel på instrument-tag för Hemocue 201+ RT, med organisationens egen numrering/beteckning.



LMC-HHB2-0001

Instrument-tagen innehåller två eller tre delar:

LMC- indikerar för Plus-skärmen att streckkoden kommer med "instrument"-information

HHB1 indikerar för Plus-skärmen att det gäller "Hemocue 201+ Hb". Detta berättar även för Plus-skärmen vilket protokoll som ska användas vid kommunikation till mätaren, i vilken hastighet samtalet ska föras och vilken mjukvara / vy som ska startas på Plus-skärmen.

-**0001** Alternativt fält som är reserverat för lokal identifiering av mätaren hos vårdgivaren. Detta fält är en option och behöver inte användas.

Fältet kan innehålla ett löpnummer som följer mätarens liv hos vårdgivaren för att skapa spårbarhet vid felsökning. Vårdgivarens valbara identifikationsfält kan innehålla både siffror och bokstäver för att passa vårdgivarens interna arbetsflöden.

Ansluta kabeln

Dessa anslutningskablar kan se lite olika ut, men alla har i den ena änden en USB kontakt som ska anslutas i någon av Plus-skärmens USB portar enligt bild.

I den andra änden av kabeln finns den anslutningskontakt som krävs för att ansluta mätaren / instrumentet. Anslut kabeln enligt bild.

Produkt som behövs:

- ZAF-520-3

